

## 小動物・小型犬のエコー検査用

# 中・小動物用超音波検査用脚付マット（V字パッド付）



### 仕様・規格

品番	MEM-101
サイズ	W900xD500xH200（脚部を含む）
表面材	抗菌レザー
芯材	ウレタンスポンジ
重量	7.5kg

### ・マットカラー

<span style="color: blue;">■</span>	ブルー
<span style="color: black;">■</span>	ブラック
<span style="color: pink;">■</span>	ピンク


※実際の色とは異なります

価格	73,000円（税別）
----	-------------

## 特徴

- 正確で再現性の良い心エコー計測が可能
- 左右胸部・腹部検査に対応
- 動物の安定姿勢維持と保定可能
- 保定者にもやさしいマット使用
- 診察台に安定使用可能
- 自立保管可能で省スペース
- 中央部の縫い目をなくした滑らかなマットを実現
- マットの切り込みが三角であるため大～小型の動物まで安定姿勢で再現性の良い断層心エコーを容易に
- 最適なマットの傾斜角度によりさらに安定姿勢

V字パッドが標準で付属

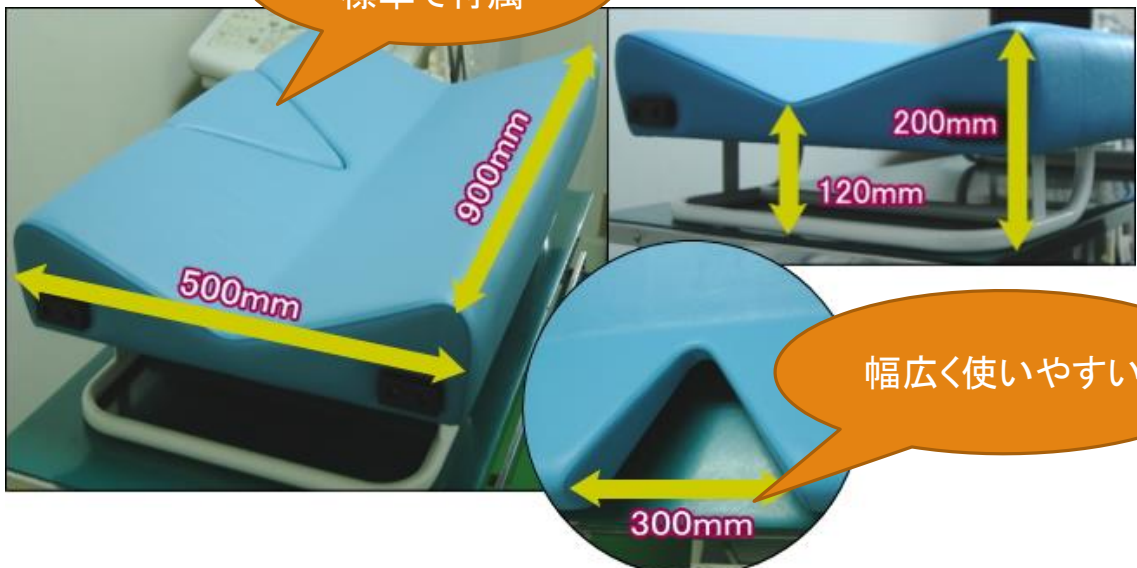

幅広く使いやすい

# 御使用方法



心 エ コ ー



腹 部 エ コ ー

心臓超音波検査の際は、V字パッドを外し、既存の診察台から、動物の大きさにも依りますが、検査者側にマットをスライドさせ使用致します。

(← はスライドさせたところ)

保定者もイスに掛け、安定姿勢で動物を保定することをお薦め致します。

V字パッドを外す際は、V字頂点にございますネジを緩めて下さい。



マットは中央部が凹の状態になるよう緩やかな傾斜をつけてあり、腹部超音波検査の際も安定姿勢の保持が可能です。(V字パッドを装着の上御使用下さい。なお装着時はV字頂点のネジをお締め下さい)

また、やさしいマットを使用しておりますので保定者の肘等への負担が軽減され、保定者も安定姿勢で保定が可能です。



V字パッド装着時

マットの保管に際しては、自立保管が可能な構造となっておりますが、保管場所を考え転倒によるマットの破損と怪我には十分に御注意下さい。



MECHATEX 有限会社 **メカテックス**

〒015-0013 秋田県由利本荘市石脇字田尻野10-224

Tel.0184-23-0955 Fax.0184-27-1579

E-mail: info@mechatex.com

◎第三種動物用医療機器製造販売業 (許可番号: 29製販療Ⅲ第25号)

◎動物用医療機器製造業

(許可番号: 29製造療第108号)

販売元